

ReSound[®]사는 현재까지 전 세계 80개국에서 모든 유형의 난청을 해결할 수 있는 다양하고 폭넓은 보청기 솔루션을 제시하고 있습니다. 리사운드 보청기는 소리품질 세계 1위, 보청기 만족도 1위 등 최고의 기술력으로 인정받는 보청기입니다.

안드로이드용 리사운드 스마트 앱에 대한 더 많은 정보는 리사운드 홈페이지(www.resoundkorea.com)에서 확인할 수 있습니다.

(주)지엔리사운드 코리아
서울시 광진구 천호대로 531-1 광우빌딩
고객센터 : 1577-2922 www.resoundkorea.com

The trademarks listed are owned and used by The GN ReSound Group and its related affiliates. © 2015. Android and Google Play are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

ReSound
rediscover hearing



SURROUND
SOUND
by ReSound

ReSound Smart
Hearing™ aids

리사운드 스마트 앱 가이드 (안드로이드용)



ReSound
rediscover hearing

ReSound Smart
Hearing™ aids

리사운드 스마트 앱 가이드 (안드로이드용)



SURROUND
SOUND
by ReSound

ReSound
rediscover hearing



리사운드 스마트 보청기를 소개합니다.

리사운드 스마트 보청기 모델을 확인하세요!

사용 중인 보청기가 리사운드 스마트 앱과 무선 연동하기 위해서는 반드시 보청기의 펌 웨어가 최신 버전이어야 합니다.
만약 사용 중인 보청기와 리사운드 스마트 앱이 호환하지 않는다면, 전문가를 통한 보청기 모델 및 펌 웨어 업그레이드가 필요합니다.



ReSound LiNX²™



ReSound LiNX™



ReSound LiNX TS™



ReSound ENZO™



ReSound Up Smart™

리사운드 스마트 보청기와 호환하는 안드로이드 스마트폰

리사운드 스마트 보청기는 가장 대중적인 안드로이드 스마트폰 중 하나인 삼성 갤럭시 S4, S5, S6, S6 Edge, Note4 등(안드로이드 OS 킷캣 4.4.2–4.4.4 / 롤리팝 5.0)에서 작동합니다.

향후 추가 연동되는 안드로이드 스마트폰 기종의 리스트는 리사운드 홈페이지 스마트 앱 관련 페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

업데이트되는 안드로이드 스마트폰 호환 기종의 정보를 확인하세요,
www.resoundkorea.com



삼성 갤럭시 S5



리사운드 스마트 앱으로 개인 맞춤 스마트 컨트롤을 경험하세요 !

안드로이드 스마트폰과 사용자의 보청기를 무선으로 직접 연결하는 세계 최초의 보청기 어플리케이션인 리사운드 스마트 앱을 소개합니다. 리사운드 스마트 앱은 사용자의 청취 경험을 개인화하기 위한 기본적인 보청기 조절 기능은 물론 향상된 추가 편의 기능을 제공합니다.

리사운드 스마트 앱으로 무엇을 할 수 있나요?

리사운드 스마트 앱으로 가능한 것들 :

- 보청기 볼륨 무선 조절
- 청취 환경 프로그램 변경
- 청취 환경 프로그램 이름 설정
- 저음/고음 조절을 통한 보청기 음질 설정
- 즐겨찾는 장소의 청취 설정 및 목록 저장
- 무선 연결 상태 및 보청기 배터리 잔량 확인
- 사용자 보청기의 개인화된 정보 확인
- 잃어버린 보청기 위치 찾기 지원 기능

리사운드 스마트 앱은 어디에서 다운 받을 수 있나요?



안드로이드용 리사운드 앱은 구글 플레이 스토어에서 무료로 다운로드 받을 수 있습니다.

- 사용 중인 안드로이드 스마트폰에서 구글 플레이 스토어로 이동 후 ReSound 또는 리사운드로 검색합니다.
- 설치 버튼을 누른 후 수락 버튼을 눌러 스마트폰의 블루투스 기능에 앱이 접근할 수 있도록 승인합니다.
- 이제 사용자의 폰에 앱이 설치될 것입니다.
- 설치가 완료되면, 열기 버튼을 눌러 리사운드 스마트 앱을 사용할 수 있습니다.

리사운드 홈페이지에 방문하시어 더 많은 정보를 확인하세요, resoundkorea.com

안드로이드 스마트폰과 무선으로 연결하기

사용 중인 안드로이드 스마트폰과 리사운드 스마트 보청기를


무선으로 페어링 연결하는 방법

리사운드 스마트 보청기에 새 배터리를 넣어주세요.

배터리 도어를 닫지 않으면, 보청기 전원이 켜지지 않습니다.



사용자의 보청기가 호환되는 기종에 해당하는지 스마트 보청기 목록에서 확인해주시기 바랍니다.

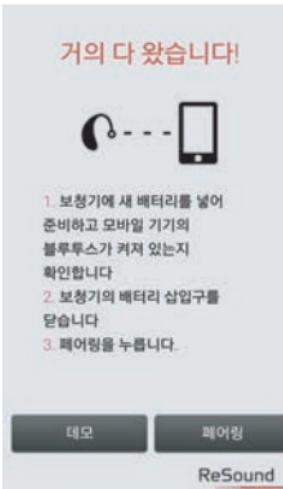

애플 근처의 보청기를 검색합니다.





사용자의 보청기를 선택하고 연결하기 버튼을 눌러주세요. 만약, 보청기를 찾지 못했다면 검색하기 버튼을 눌러 다시 검색해주세요.



스마트폰이 사용자의 보청기와 연결되면 이제 앱을 사용할 준비가 완료된 것입니다.



무선 연결 끊는 방법
만약 다른 스마트 보청기와 연결하기를 원하는 등의 이유로 스마트폰과 보청기의 연결을 끊기를 원한다면, 다음 단계에 따라 주시기 바랍니다.

앱 내부의 설정 페이지에서 보청기 연결 끊기를 클릭해 주세요. 팝업되는 알림창의 연결 끊기 버튼을 누르면 보청기와의 연결이 끊어질 것입니다.

연결이 끊어진 경우, 다시 연결 하는 방법
보청기가 스마트폰과 너무 멀어지거나, 보청기 혹은 스마트폰의 전원이 꺼지는 경우에는 더 이상 무선 연결이 유지되지 않습니다.
그러나, 다시 보청기와 스마트폰의 거리가 가까워지거나, 전원이 켜지면, 몇 초 후 자동으로 재연결됩니다.

TIP 연결이 끊긴 보청기 활성화 시키는 방법
연결이 끊어지면, 6 페이지의 절차에 따라 스마트폰과 보청기를 다시 연결할 수 있습니다.

리사운드 스마트 앱

리사운드 스마트 앱은 크게 볼륨 조절 화면과 프로그램 선택 화면으로 구성되어 있습니다.
사용자는 화면을 옆으로 밀어 간단히 다른 화면으로 이동하거나, 네비게이션 버튼을 사용
할 수 있습니다. 또한 메인 메뉴 버튼을 사용해 추가적인 앱의 기능을 사용하는 것도 가능합니다.



보청기 볼륨 조절하기 설정



보청기 볼륨 통합 조절

볼륨 조절 슬라이드를 올리면
볼륨이 커지고 내리면 볼륨이
작아집니다.



이 버튼을 클릭하면 음소거
상태가 되며, 다시 클릭하면
음소거가 제거됩니다.



보청기 볼륨 개별 조절

볼륨 개별 조절 버튼을 클릭하면
보청기 볼륨을 각각 개별적으로
조절할 수 있으며, 다시 클릭하면
통합 조절 상태로 변경됩니다.



조절 버튼은 화면 맨 아래에서
확인할 수 있습니다.

TV 스트리머 볼륨 조절하기



스트리머 볼륨 통합 조절

스트리머 장치를 선택하면,
사용자는 보청기 볼륨과
별개로 스트리머의 볼륨을
설정할 수 있습니다.

보청기 볼륨

사용자는 무선으로 스트리밍되는
소리에는 영향을 주지 않으면서
보청기 볼륨을 음소거하거나
조절할 수 있습니다.



스트리머 볼륨 개별 조절

사용자는 화면 하단의 통합/독립
볼륨 선택 버튼을 통해 오른쪽과
왼쪽 보청기의 볼륨은 물론
스트리머의 볼륨까지도 독립적으로
조절할 수 있습니다.

TIP 볼륨 설정을 초기화 상태로 되돌리는 방법

볼륨을 기본값으로 초기화하려면 볼륨 조절 슬라이드의
하얀 버튼을 중앙 기본값 표시 부분으로 옮겨주세요.

프로그램 변경하기



청취 프로그램 변경하기



특정 청취 상황에 최적화된 4개의 청취 프로그램 중 하나를 선택하면 해당 프로그램으로 변경됩니다.



스트리밍 장치 변경하기



이 버튼을 누르면 리사운드 유나이트 TV 스트리머 2와 같은 리사운드 무선 스트리밍 액세서리 장치를 활성화합니다.

보청기 음질 조절하기



옵션 더 보기




이 버튼을 누르면 사용자의 청취 경험을 개인맞춤하기 위한 추가적인 옵션 기능이 팝업으로 나타납니다.

음질 조절 옵션



이 버튼을 누르면 보청기로 들리는 소리에 대한 음질을 조절할 수 있는 화면으로 이동합니다.

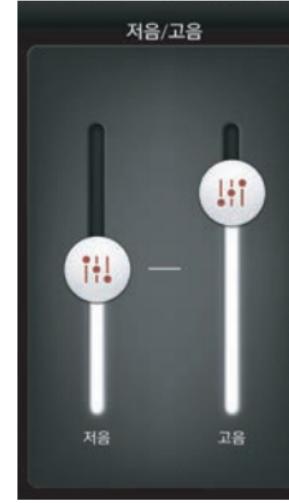

보청기 음질 조절하기



슬라이드를 위 아래로 변경해 저음부 및 고음부의 음질을 조절합니다.

TIP 사용자 개인 설정을 저장하는 방법

사용자는 특정 장소에서 자신에게 편안한 음질 설정을 저장할 수 있습니다. 즐겨찾는 장소로 저장된 설정은 쉽고 간단하게 확인하고 조절하거나 불러올 수 있습니다.

즐겨찾는 장소

사용자는 자신이 선호하는 장소에 대한 음질, 볼륨 등 청취 설정을 저장하고 언제든지 변경 또는 불러올 수 있습니다. 또 저장된 장소에 다시 방문했을 때 자동으로 저장된 설정을 불러오는 것도 가능합니다.



즐겨찾는 장소 추가하기
사용자는 장소 추가하기 기능을 통해 좋아하는 장소에서의 볼륨 및 음질 설정을 저장할 수 있습니다. 사용자는 자신이 저장한 장소에 방문했을 때 자동으로 설정이 변경되도록 하거나, 임의로 변경하는 것이 가능합니다.




즐겨찾는 장소 전체보기
내 장소 화면에서 + 버튼을 눌러 새로운 장소에 대한 설정을 추가할 수 있습니다. 또한 저장된 장소 목록은 리스트 보기와 지도 보기를 선택해 확인할 수 있습니다.



즐겨찾는 장소 추가 기능
저장된 장소 목록을 왼쪽으로 밀면 나타나는 추가 기능 :

- 지도에서 보기
- 자세한 내용
- 제거

지도 탭을 클릭하면 지도 상으로 저장된 장소를 확인할 수 있습니다.

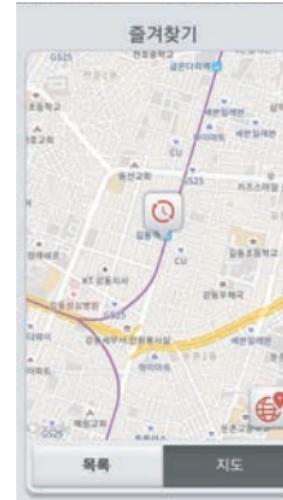

즐겨찾는 장소 지도보기

지도상 위치로 볼 수 있습니다 :

- 저장된 모든 장소를 지도 상에서 확인할 수 있습니다.
- 주소 및 마지막으로 방문한 일시 등 장소에 대한 세부정보를 확인할 수 있습니다.
- 저장된 장소에 관계없이 사용자는 언제 어디서든 모든 설정을 불러올 수 있습니다.

TIP 저장된 설정 편집하기

저장된 장소의 볼륨 및 음질 등 설정을 변경하기를 원하는 경우, 사용자는 새로운 장소를 추가하지 않고도 기존의 저장된 설정을 편집해 다시 저장할 수 있습니다.

TIP 특정 청취 상황을 저장하는 방법

사용자는 특정 상황에서 선호하는 보청기 설정을 저장할 수 있습니다. 예를 들면, 사전에 교통 소음 상황에서의 가장 선호하는 설정을 저장해두면, 사용자는 언제든지 교통 소음 상황에서 이 기능을 사용할 수 있습니다.

잃어버린 내 보청기 위치 찾기




보청기 위치 찾기

보청기 위치 찾기 기능으로 잃어버린 보청기 위치를 확인할 수 있습니다.

주변 검색 기능

앱이 주변에서 보청기를 탐색했다면, 주변 검색 기능을 사용할 수 있습니다. 사용자가 보청기에서 가까워지거나 또는 멀어지면 붉은 색 바가 줄어들거나 늘어나면서 잃어버린 보청기 찾기를 도와줍니다.

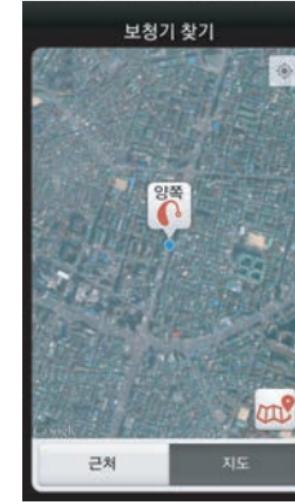

지도 검색 기능

앱이 보청기를 먼 곳에서 탐색했다면, 지도보기 모드로 화면을 전환해 가장 최근에 접속이 끊어진 위치를 지도 상의 위치로 확인할 수 있습니다.

마지막 접속 위치 표시

가장 마지막으로 접속된 위치 표시를 클릭하면 주소 등 정보를 확인할 수 있습니다.

추가적인 앱 기능

보청기 관리 및 사용법 등 정보를 확인할 수 있습니다.



내 보청기 화면

사용자의 스마트 보청기를
보다 잘 관리하기 위한
정보를 제공합니다.



배터리 잔량 표시



현재 스마트 보청기의 배터리
잔량을 확인할 수 있습니다.



배터리 잔량이 충분한 경우
꽉찬 아이콘으로 표시되며,
잔량이 부족하거나 거의 없는 경우
빈 아이콘으로 표시됩니다.

무선 연결 상태 표시




사용자의 무선 연결 상태를 확인하세요.

사용자의 보청기와 스마트폰 또는 스트리밍 장비와의
무선 연결 상태를 보여줍니다.
연결 신호를 유실했거나 끊어진 경우 연결선이 붉은 색으로
바뀌어 쉽게 확인할 수 있습니다.

TIP 연결을 끊어버린 경우 대처 방법

무선 연결 상태가 갑자기 끊어진 경우에는 먼저 보청기가 켜져
있는지 혹은 보청기나 스마트폰의 전원이 충분한지 확인하고,
충분히 충전하거나 새 배터리로 교체한 후에 배터리 도어를
열었다 닫으면 다시 연결할 수 있습니다.

앱 설정

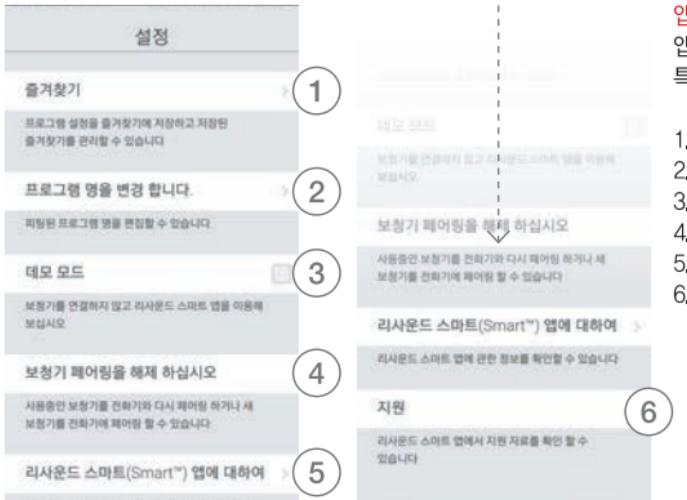

앱 설정하기

앱 설정화면에서는 리사운드 스마트 앱의 특정 기능을 조절할 수 있습니다.

1. 저장된 즐겨찾는 장소 한번에 지우기
2. 청취 프로그램 이름 재설정하기
3. 데모 모드로 전환하기
4. 보청기 무선 연결 끊기
5. 리사운드 스마트 앱의 배경 정보 확인하기
6. 지원 및 가이드 확인하기





리사운드 스마트 보청기로 사운드 스트리밍을 경험하세요.

리사운드 스마트 앱과 함께 리사운드 유나이트 폰 클립 플러스 무선 액세서리를 사용하면
안드로이드 스마트폰의 사운드 스트리밍이 가능합니다.

리사운드 유나이트 폰 클립 플러스를 사용하면 안드로이드 스마트폰의 다양한 사운드를
사용자의 스마트 보청기에서 바로 스트리밍 청취가 가능합니다.

리사운드 유나이트 폰 클립 플러스와 사용자의 안드로이드 스마트폰 무선 연결하기

- 스마트폰의 설정에서 블루투스 기능을 활성화 합니다.
- 폰 클립 플러스의 전원을 켜고, 실버캡을 제거하면,
파란색의 블루투스 무선 연결 버튼을 확인할 수 있습니다.
- 버튼을 클릭하면 블루투스 연결 모드로 전환됩니다.
블루투스 연결 완료까지는 약 20초의 시간이 소요되며,
연결이 완료되면 빨간 램프가 파란색으로 바뀝니다.
- 몇 초 후 사용자 스마트폰의 블루투스 연결 기기
목록에서 Hearing Aid Phone 을 선택합니다.
- 비밀번호를 묻는 경우, 0000을 입력하고 Headset 을
선택합니다.

리사운드 유나이트 폰 클립 플러스와 사용자의 보청기 무선 연결하기

- 보청기의 배터리 도어를 열어 주세요.
- 폰 클립 플러스의 전원을 켜고, 실버캡을 제거하면,
파란색의 블루투스 무선 연결 버튼을 확인할 수 있습니다.
- 버튼을 클릭하면 블루투스 연결 모드로 전환됩니다.
블루투스 연결 완료까지는 약 20초의 시간이 소요되며,
연결이 완료되면 빨간 램프가 파란색으로 바뀝니다.
- 보청기의 배터리 도어를 닫아 주세요.

리사운드 유나이트 폰 클립 플러스에 대한 더 자세한 정보를
원하시면 리사운드 홈페이지를 방문해주시기 바랍니다.
www.resoundkorea.com

