



(주)지엔리사운드코리아 | 서울시 광진구 천호대로 531-1 광우빌딩 4층  
Tel : 1577-2922 | Fax : 02-541-9220  
[www.resoundkorea.com](http://www.resoundkorea.com)

ReSound ENZO™

# 사용자 가이드



ReSound

rediscover hearing

## 소개

GN ReSound의 새로운 보청기를 구입해 주셔서 감사합니다. 리사운드의 혁신적인 음향 기술과 디자인은 보청기 전문가가 선택한 고객 맞춤 설정과 결합하여 귀하의 청취가 보다 즐거운 경험되도록 도울 것입니다. 보청기는 청력 손실로 인해 그 동안 듣지 못했던 소리를 다시 들을 수 있도록 해 줄 것입니다.

보청기 사용을 배워가는 데에는 연습과 긍정적인 태도가 중요합니다. 귀하의 리사운드 보청기는 개인의 청력 손실 정도와 필요에 따라 조정 되었습니다. 어떤 사람은 보청기 착용과 새로운 소리를 듣는 것에 빨리 적응하고 어떤 사람들은 조금 더 시간이 필요할 수 있습니다.

보청기 사용이 주는 모든 혜택 받기 위해서는 본 설명서를 주의 깊게 읽어야 합니다. 보청기를 적절하게 관리, 유지보수 및 사용하시면, 오랜 기간 동안 보청기를 통해 보다 나은 의사소통을 하실 수 있을 것입니다. 질문이 있으시면 의사 선생님이나 리사운드 고객 센터로 문의 주십시오.

\*ReSound는 ReSound A/S의 등록 상표입니다.

작성년월 : 2015. 3

## 사용 목적

본 제품은 청각장애를 보상하기 위해서 소리를 증폭하여 공기 전도 방식으로 전달하는 기구입니다.

### 보청기 모델

□ EO998-DW, EO798-DW, EO598-DW : 배터리 사이즈 675

튜브 유형:

---

돔 사이즈:

---

왼쪽 제조번호:

---

오른쪽 제조번호:

---

## 목차


소개 .....	2
보청기 설명 .....	6
시작하기(On/Off 기능) .....	7
동작 지연 기능(Smart Start) .....	7
배터리 삽입/교환 .....	7~8
저 전압 신호음 .....	9
보청기 작용/제거 .....	10
보청기 작동방법 .....	11
볼륨 조절하기(선택사항) .....	11
프로그램 버튼 .....	12
비행 모드 .....	13
텔레코일 .....	14
전화기 사용 .....	14
휴대폰 사용 .....	15
PhoneNow .....	15~16

라디오/TV청취 .....	17
오디오 직접 입력(DAI) .....	17
통합형 FM 어댑터(Integrated FM) .....	17
오디오 직접입력(DAI)의 연결/연결해제 .....	18
보청기 보관 및 관리 .....	19
저장 방법 .....	19
기타 보관방법 .....	19
일반적인 주의사항 .....	20
일반적인 경고사항 .....	21
배터리 경고사항 .....	22
기타사항 .....	23
문제 해결 .....	24~27
보증 및 수리 .....	28
보청기 .....	28
스마트폰 어플리케이션과 리사운드 보청기의 사용 .....	29

## 보청기 설명

ReSound ENZO™


1. 프로그램 버튼
2. 배터리 삽입구(도어)
3. 사운드 출구
4. 마이크로폰
5. 마이크로폰
6. 볼륨 조절기(옵션사항)
7. 배터리 도어락(배터리 잠금장치)
8. 구별마커
9. 이어훅

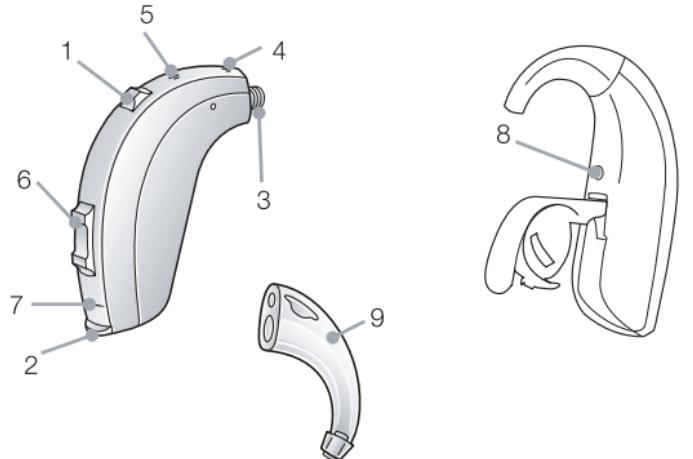

## 시작하기

On/Off 기능

1. 배터리 삽입구를 닫으면, 보청기가 켜지고 기본 설정 프로그램이 작동합니다.
2. 손톱을 이용하여 배터리 삽입구를 잡아당기면 배터리 삽입구가 열리고 보청기가 꺼집니다.

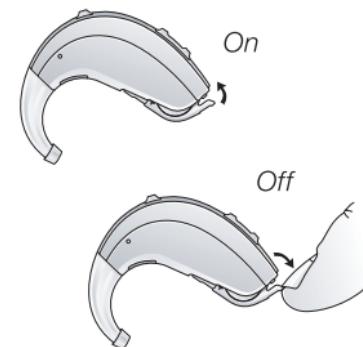

## 동작 지연 기능(Smart Start)

보청기를 귀에 착용하시면 보청기가 켜집니다. 동작지연 기능인 Smart Start를 보청기에 활성화 시키면, 배터리 삽입구를 닫은 후 보청기가 켜지기까지 시간을 10초 동안 지연시킬 수 있습니다. Smart Start 기능이 시작되면 보청기가 켜지기 전 10초 동안 1초 간격으로 빠- 소리를 내어, 시간이 얼마나 남았는지를 알려줍니다.

## 배터리 삽입/교환

1. 손톱을 이용하여 배터리 삽입구를 완전히 열어 놓고 다 쓴 배터리는 삽입구에서 제거합니다.
2. 새 배터리를 준비하여 안전막을 제거하고 보청기에 넣기 전에 2분간 활성화 시켜줍니다.
3. 올바르게 +방향으로 삽입합니다.
4. 배터리 삽입구를 부드럽게 닫아줍니다.



- Tip : 1. 유통기한이 1년 이상 남아있는 Zinc-Air 배터리만을 사용합니다.  
2. 보청기를 사용하지 않을 때는 보청기를 꺼두어 배터리 소모를 예방합니다.  
3. 배터리에서 스티커(안전막)를 제거하고 사용하기 전 2분간 공기 중에 놓아 둡니다.

#### 배터리 삽입구 잠금장치 (배터리 도어락) – 옵션사항

슈퍼파워(SP) 보청기에는 배터리 삽입구 잠금장치가 있습니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 함께 제공되는 도구(뾰족한 검정색 도구)를 이용하면 됩니다.

#### 배터리 삽입구 잠금장치를 잠그기 위해서

1. 배터리 잠금장치 구멍에 함께 제공된 뾰족한 도구를 넣습니다.
2. 왼쪽으로 밀어서 잠금합니다.
3. 도구를 제거하면, 잠금장치는 “잠금”의 위치에 흰색의 점으로 표시가 됩니다. 이 때는 배터리 삽입구가 잠금상태이기에 열수가 없습니다.

#### 배터리 삽입구 잠금장치를 해제하기 위해서

1. 배터리 잠금장치 구멍에 함께 제공된 뾰족한 도구를 넣습니다.
2. 오른쪽으로 밀어서 잠금을 해제합니다.
3. 도구를 제거하면, 잠금장치는 “해제”의 위치로 돌아갑니다. 배터리 삽입구를 열어서 배터리 교환을 할 수 있습니다.

#### 저 전압 신호음(Low battery indicator)

배터리 수명이 다해갈 때 신호음으로 이를 알려주는 기능으로 보청기 전문가를 통해 설정할 수 있습니다. 배터리 수명이 다한 경우 보청기 전압이 낮아지면, 보청기의 증폭이 감소하고 보청기 신호음이 발생하게 됩니다. 보청기가 자동으로 꺼질 때까지 15분마다 한 번씩 신호음이 울립니다. 여유분의 배터리를 휴대하시기를 권장합니다.

#### 저 전압 신호음 (보청기와 무선 액세서리를 함께 사용하는 경우)

ReSound의 무선 액세서리(리모트 컨트롤, 폰 클립, TV 스트리머, 미니 마이크로폰)를 사용하면, 보청기만 사용할 때 보다 더 많은 양의 보청기 배터리 전원이 소모 됩니다. 즉 배터리 수명은 무선 액세서리 사용 양에 따라 많은 영향을 받습니다. 보청기의 배터리 전원이 급격히 감소해서 ReSound Unite TV 스트리머, 폰 클립, 미니 마이크로폰을 지원할 수 없는 경우, 보청기가 두 번에 걸쳐 하강하는 음을 울릴 것입니다. 이후 보청기와 ReSound Unite 리모트 컨트롤은 평소와 같이 작동하지만, ReSound Unite TV 스트리머와 폰 클립, 미니 마이크로폰은 사용할 수 없습니다. 시간이 지나면 Remote Control 또한 작동을 멈추게 되고, 전과 같은 하강 음을 듣게 됩니다. 보청기는 전과같이 작동할 것입니다. 새 배터리로 교체하면, 액세서리의 모든 기능이 재개됩니다.

## 보청기 착용/제거


- 1) 엄지와 검지로 이어몰드를 잡고, 이도에 음향 배출구 부분을 넣습니다.
- 2) 이어몰드 또는 둠을 부드럽게 돌려 이도에 밀어 넣습니다.
- 3) 다른 한 쪽 손으로 귀의 뒤 쪽을 잡아 당겨주면 더 쉽게 삽입할수 있습니다.
- 4) 이어몰드의 경우, 윗부분을 위아래로 부드럽게 돌리면 귀의 접힌 피부 뒤로 딱 맞게 됩니다. 이어몰드를 위아래로 움직이면서 귀에 알맞게 위치해 있는지 확인하기 위해 부드럽게 눌러줍니다. 입을 벌렸다 닫았다 하면 착용이 용이합니다.
- 5) 둠의 경우, 귓속으로 충분히 밀어넣어 튜브가 머리 쪽을 따라 놓이게 합니다.
- 6) 보청기가 귀 뒤에 잘 장착되었는지 확인합니다.
- 7) 배터리 도어를 닫으면 보청기는 올바르게 작동하게 됩니다.
- 8) 올바르게 삽입된 보청기에서 피드백(휘슬링)이 일어나게 됩니다.
- 9) 배터리 도어를 “off” 위치로 옮겨서 보청기의 전원을 끕니다.
- 10) 귀 뒤에 매달리도록 보청기를 움직여 둡니다.
- 11) 이어몰드의 경우, 엄지와 검지로 귀에서 이어몰드를 당기면서 부드럽게 빼줍니다.  
둠의 경우, 튜브를 엄지와 검지로 잡고 튜브를 제거합니다.



## 보청기 작동방법

### 볼륨 조절하기(옵션사항)

1. 볼륨 조절기 위쪽을 누르면 볼륨이 증가하고 아래쪽을 눌러주면 볼륨이 감소합니다.
2. 볼륨이 증가 또는 감소할 때면, 변경마다 신호음이 울리고 볼륨의 최대치 또는 최저치에 도달하면 보다 긴 신호음이 울립니다.

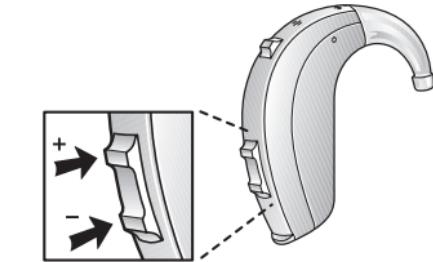

동기화 기능을 이용할 수 있는 동일한 두 개의 보청기를 사용한다면, 한 쪽 보청기의 볼륨 조절기를 조작하면 다른 보청기에서 자동적으로 볼륨조절이 이루어집니다. 한 쪽 보청기에서 볼륨조절이 이루어지면, 비프음을 들게 될 것입니다. 그리고 다른 한 쪽의 보청기에서도 곧 비프음을 들을 수 있게 됩니다.

※ 볼륨 기능을 원하지 않을 경우에는 볼륨조절 기능을 설정하지 않을 수 있습니다.  
또한 볼륨 기능이 없는 커버로 교체할 수도 있습니다.

슈퍼파워(SP) 보청기는 볼륨조절기의 하단버튼을 길게 누름으로 추가된 기능을 사용할 수 있습니다.  
(아래 기능 중 선택하여 설정)


- 최소볼륨 – 보청기의 볼륨이 최소한으로 감소하게 될 것입니다.
- 전원대기 – 스탠바이 모드, 보청기는 재활성화 될 때까지 소리를 증폭시키지 않습니다.  
이 모드는 보청기의 전원이 꺼진 것이 아닙니다.

다시 이전 상태로 돌아오려면 볼륨 조절기의 상단 버튼을 누르면됩니다.

## 프로그램 버튼

보청기 사용 경험 정도, 개인적인 필요성, 또는 청취 환경 등에 따라 보청기 전문가를 통해 보청기에 프로그램을 추가할 수 있습니다. 아래와 같이 작동 하시면 됩니다.

- 버튼을 1회 누르면 프로그램 사이로 이동할 수 있습니다.
- 이 경우 1회 또는 1회 이상의 신호음이 울리고 신호음 횟수로 선택한 프로그램을 알 수 있습니다.(예: 신호음 1회 = 프로그램 1, 신호음 2회 = 프로그램2)
- 보청기를 끄고 다시 켜면, 보청기는 항상 기본설정(프로그램1)으로 되돌아 갑니다.

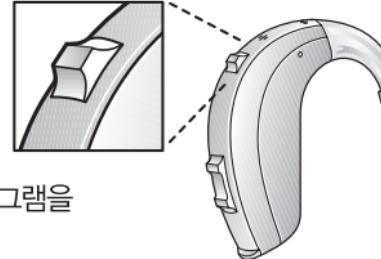

프로그램	사용환경( 담당자와 상의 후 입력)
1	
2	
3	
4	

동기화 기능을 사용할 수 있는 두 개의 보청기를 사용하고 있다면, 한쪽의 보청기에서 프로그램이 변경되면 다른 한쪽의 보청기는 자동으로 변경될 것입니다. 한 쪽의 보청기에서 프로그램 변화가 일어났다면, 다른 한쪽의 보청기에서 동일한 비프음을 듣게 될것입니다.

## 비행 모드\* (무선 보청기에만 해당)

비행기 탑승 시 또는 RF 송신기가 금지된 장소에서는 전파신호 방출이 금지되어 있으므로 무선 기능을 반드시 비활성화 해야 합니다.

배터리 삽입구를 10초 이내에 3회 열었다 닫으면 (열기-닫기, 열기-닫기, 열기-닫기) 보청기가 비행모드로 전환되어 무선 기능을 사용할 수 없게 됩니다. 비행모드로 전환된 보청기는 무선기능을 다시 활성화 하기 전에 최소 10초간 비행모드를 지속하게 됩니다. 무선 기능을 재 활성화 하려면 다시 한번 배터리 삽입구를 열었다 닫아야 하며 이 동작 후 10초 후에 무선기능이 다시 시작됩니다.

주의 : 무선 기능이 재개된 이후 배터리 삽입구를 열었다 닫기 전에 추가로 10초간 기다리는 것이 중요합니다.  
배터리 삽입구를 10초 동안에 열었다 닫으면 비행 모드가 다시 시작됩니다.


## 텔레코일(옵션사항)

보청기에 텔레코일이 장착되어 있다면, 보청기 전문가를 통해 텔레코일을 활성화 시킨 후, 별도의 프로그램으로 추가하여 사용할 수 있습니다. 텔레코일은 전화기의 자성 신호를 수신해서 소리로 변환시켜 줍니다. 텔레코일 프로그램을 사용할 경우에는 수화기를 보청기 가까이에 댑니다. 수화기를 조금씩 다른 위치로 움직여 통화에 가장 적절한 위치를 찾는 노력이 필요할 수도 있습니다. 공공시설 등에 장착된 Tele-loop system과 같이 사용하면 언어의 이해도를 향상시켜줍니다.

## 전화기 사용

보청기를 착용한 상태에서 수화기를 귀에 대기에 가장 알맞은 위치를 파악하는 데는 연습이 필요할 수 있습니다. 아래 제시된 방법이 도움이 되실 것입니다.

1. 수화기를 평소와 같이 잡으세요.
2. 수화기가 귀의 윗부분으로 향하도록 합니다(마이크가 있는 쪽에 가깝게).
3. 만일 휘파람 소리가 들린다면, 보청기가 조정하여 피드백을 제거하도록 몇 초간 같은 위치에서 수화기를 잡고 계십시오.
4. 수화기를 귀에서 약간 떼어 주면 휘파람 소리가 감소할 수 있습니다.
5. 개인적인 필요에 따라, 전문가를 통해 전화기 사용에 필요한 특별 프로그램을 활성화 시킬 수 있습니다.

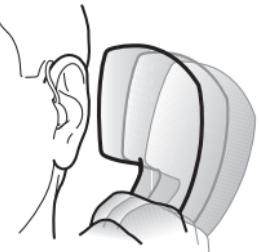

## 휴대폰 사용

보청기는 국제 전자파적합성(EMC)의 규격에 따라 설계 되었습니다. 그러나 모든 휴대폰이 보청기와 호환되는 것은 아닙니다. 사용하시는 휴대폰 및 무선 통신 회사의 고유 특성에 따라 전파 방해의 정도에 차이가 있을 수 있습니다. 만일 휴대폰 사용에 있어 어려움이 있는 경우에는, 보청기 전문가가 청취 능력을 향상시켜 줄 수 있는 액세서리를 추천해 드릴 것입니다.

### PhoneNow

전화 수화기를 귀에 대면, 보청기 프로그램이 자동으로 전화기 프로그램으로 전환되는 기능으로 수화기를 귀에서 떼면 자동으로 이전의 청취 프로그램으로 되돌아 갑니다.

### PhoneNow 자석 부착

PhoneNow 기능을 활성화 시킬 수 있는 충분한 자기장을 갖고 있는 전화기가 있는 반면 자석을 추가로 수화기에 부착해야 하는 전화기도 있습니다.



## PhoneNow 사용

전화기는 평상시대로 사용하면 됩니다. 발신음이 울리면 PhoneNow 기능이 자동으로 보청기에서 전화 프로그램으로 전환되었음을 알려줍니다. 처음 사용에는 전화 수화기 부분을 귀에서 조금씩 움직여서 PhoneNow 기능이 가장 안정적으로 작동되고 수신상태가 양호한 위치를 찾는 노력이 필요합니다.  
만일 동기화기능을 이용할 수 있는 두개의 보청기를 사용할 경우, 전화기를 대지 않은 쪽의 보청기의 전원을 꺼야할 것입니다.

## PhoneNow 예방조치

1. 자석은 애완동물, 아이들, 또는 정신적 장애가 있는 사람의 손에 닿지 않는 곳에 두시기 바랍니다.  
만일 자석을 삼킨 경우에는 의사의 도움을 받으십시오.
2. 자석은 특정 의료기기 또는 전자 시스템의 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 자석에 민감한 기기 (예: 심장박동기)를 생산하는 제조업체는 보청기와 자석을 문제의 의료기기 및 전자 시스템에 근접하여 사용할 경우, 필요적합한 안전 수칙에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 제조업체가 특별한 언급을 하지 않은 한, 자석 또는 자석을 장치한 전화기는 자성에 예민한 기기(예: 심장박동기)로부터 최소 30cm(12") 거리를 유지 하십시오.
3. 전화를 거는 중이나 전화통화 중에 소리의 일그러짐 현상이 크다면, 자석의 수화기 상의 위치가 적절하지 못하다 것을 의미할 수 있습니다. 이 경우, 자석을 수화기의 다른 위치로 옮겨 보시기 바랍니다.
4. GN ReSound에서 제공된 자석만을 사용하십시오.

## 라디오/TV 청취

라디오/TV를 청취 시에는, 항상 명확한 발음하는 뉴스 아나운서의 말소리를 듣는 것을 시작으로 하여 다른 프로그램들도 청취해 보십시오. 만일 라디오/TV를 듣는 데에 어려움이 있다면, 보청기 전문가가 라디오/TV 청취력을 증강시켜 주는 액세서리를 추천해 드릴 것입니다.

## 오디오 직접 입력(Direct Audio Input: DAI) (별도구매)

오디오 직접 입력(DAI)기능을 이용하면 보청기에 텔레비전, 라디오, 리모트 마이크로폰 등을 직접 연결하여 언어 이해도를 향상 시킬 수 있습니다. 음원이 오디오부츠의 케이블이나 무선 FM시스템이 보청기에 연결 됩니다. 오디오부츠는 배터리 삽입구를 보청기에서 분리한 후, 배터리를 삽입한 DAI를 보청기에 연결하고 제자리에 잘 부착되면 보청기가 자동으로 DAI 모드로 전환됩니다.


## 통합형 FM 어댑터(Integrated FM) (별도구매)

사용을 원할 경우, 보청기 담당자에게 문의하십시오. FM 시스템은 말하는 사람이 먼 거리에 있거나 시끄러운 공간에 있는 것 같은 여러 상황에서 대화 이해력을 향상 시킬 수 있습니다.

## 오디오 직접입력 또는 통합형 FM 어댑터의 연결/연결해제

### 오디오 직접입력 또는 통합형 FM 어댑터의 연결

- 연결하기 위해서 먼저, 배터리 도어를 보청기에서 분리해야 합니다. 제공된 뾰족한 도구로 배터리 도어의 연결부분에 있는 핀을 제거하여 배터리 도어를 분리합니다.
- 분리된 배터리 도어대신 배터리가 삽입된 오디오 직접입력(DAI) 또는 통합형 FM 어댑터로 교체한뒤, 제거된 핀을 삽입하여 연결합니다.
- 연결해제하기 위해서 오디오 직접입력(DAI) 또는 통합형 FM 어댑터의 연결부분을 뾰족한 도구로 핀을 제거하여 보청기로부터 분리합니다.
- 배터리도어를 삽입한 뒤, 연결 부분에 핀을 삽입하여 보청기에 연결합니다.

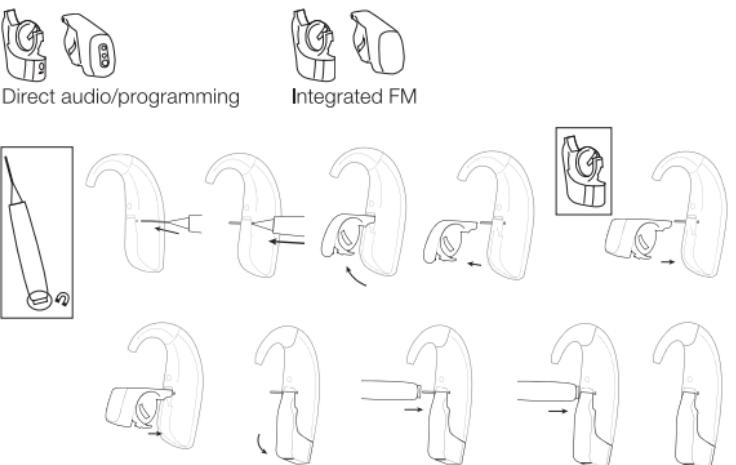

### 오디오 직접입력 또는 통합형 FM 어댑터의 연결해제

- 오디오 직접입력(DAI)의 앞쪽버튼을 누른 뒤 누른 상태를 지속합니다.
- 보청기로부터 오디오 직접입력(DAI)을 부드럽게 제거합니다.

## 보청기 보관 및 관리

- 보청기는 항상 청결하고 건조한 상태를 유지해야 합니다. 사용 후에는 부드러운 천으로 케이스를 닦아 기름기와 습기를 제거합니다.
- 보청기를 손상시킬 수 있는 물이나 기타 용액을 사용하지 않습니다. 보청기가 물에 젖거나 과도한 습기 또는 땀에 노출된 경우, 보청기에서 배터리를 제거하고 배터리 삽입구를 열어 놓아 건조시킵니다. 건조제가 담긴 용기에 보관을 권장합니다.
- 절대로 보청기를 물이나 기타 액체에 담가서는 안 됩니다. 액체는 보청기의 영구적인 손상을 초래할 수 있습니다.
- 보청기를 조심스럽게 다루어 주시고, 딱딱한 표면이나 바닥에 떨어뜨리지 마십시오.

### 저장방법

운반 및 보관 동안, 온도는  $-20^{\circ}\text{C}$ ~ $60^{\circ}\text{C}$ 의 한계치, 상대습도 90%RH 이내이어야 합니다.

### 기타 보관방법

보청기를 사용하지 않을 때는 배터리 창을 열어 보청기를 끈 뒤에 제공된 보관용 상자에 보관하고 습하지 않은 건조한 곳에 보관합니다. 보청기 손상과 케이스 변형을 줄 수 있으므로 과도한 열이나 직사광선을 피하도록 합니다.

## 일반적인 주의사항

- 보청기를 직사광선, 사격장 근처 또는 주차상태의 가열된 자동차 안에 두지 않습니다.
- 샤워 또는 수영 중, 폭우 시, 또는 한증탕이나 사우나 같은 습한 환경에서 보청기를 착용하지 않습니다.
- 보청기에 습기가 생기면, 보청기에서 배터리를 제거한 후 습기 제거통에 넣습니다. 습기 제거통 또는 키트 옵션 제공에 대해서는 보청기 담당자에게 문의합니다.
- 화장품, 향수, 애프터 쉐이브, 헤어스프레이, 선팬 로션 등을 바를 때는 보청기를 착용하지 않습니다.
- 무선기능이 활성화 된 경우 보청기가 다른 무선 기기와 통신하기 위해 저 전압의 디지털로 코드화된 전파를 사용하기 때문에 항상 그런 것은 아니지만, 근처 전기 기기가 영향을 받을 수 있습니다.  
영향 받은 전기 기기로부터 보청기를 떨어뜨려 놓습니다.
- 무선 기능 사용 중에 보청기가 전자기적 간섭을 받은 경우는 보청기를 근원지로부터 떨어뜨려 놓습니다.
- 튜브와 둠과 같은 제조원이 제조한 소모품만을 사용합니다. 절대로 보청기, 이어볼드, 또는 튜브의 형태를 변형해서는 안됩니다.
- 리사운드 보청기에는 리사운드 보청기와 사용하기 위해 설계하여 검증한 리사운드 액세서리만을 연결합니다.

## 일반적인 경고사항

- 보청기 사용중 귀속에 이물질이 들어간 경우, 피부에 이상이 생긴 경우 및 귀지가 과다하게 축적된 경우에는 의사선생님께 진찰을 받습니다.
- NMR, MRI, CT스캔 등에서 발생하는 방사선은 보청기를 손상시킬 수 있으므로 이런 검사 및 유사한 검사 시에는 보청기를 착용하지 않습니다. 방범용 경보기, 실내 감지 시스템, 라디오 기기, 휴대폰 등에서 발생하는 기타 유형의 방사선은 보청기를 손상시키지 않으나 순간적으로 음질에 영향을 주거나 잠시 보청기로부터 이상한 소리를 생성하게 할 수도 있습니다.
- 광산이나 유전 및 기타 폭발의 위험이 있는 지역은 보청기 사용을 인증 받은 곳이 아니라면 보청기를 착용하지 않습니다.
- 다른 사람이 본인의 보청기를 사용하지 않도록 합니다. 그렇지 않은 경우 보청기의 손상이나 다른 사람의 청력에 손상을 가져올 수 있습니다.
- 어린이나 정신장애가 있는 분의 보청기 사용에는 항상 안전을 위한 지도가 필요합니다. 보청기는 어린이가 삼킬 수 있는 작은 부분품들이 있으므로 어린이가 보청기 사용할 때는 관리지도 없이 방치되지 않도록 주의합니다.
- 보청기는 반드시 처방된 대로 사용합니다. 올바르지 않은 사용은 청력 손실을 일으킬 수 있습니다.
- 보청기 고장 및 파손된 경우 사용하지 않습니다.
- 비행기 승선 시에는 무선기능을 종료하고 무선 주파수 송출이 금지된 구역에서는 비행모드로 전환하여 무선 기능을 종료합니다.
- 최대 음압 수위가 132 dB SPL(IEC 60711:1981 occluded ear simulator 관련)을 초과하는 보청기는 보청기 사용자의 잔여 청력을 손상시킬 위험이 있으므로, 보청기의 선택 및 피팅 시에는 특별한 주의가 필요합니다.

## 배터리 경고사항

1. 배터리를 입안에 넣지 않습니다. 배터리는 건강에 위해 하므로 배터리를 삼킨 경우 즉시 의사의 상담을 받아야 합니다.
2. 배터리는 항상 어린이 및 정신 장애가 있는 사람으로부터 격리하여 보관합니다.
3. 장기간 보청기를 사용하지 않을 때는 배터리를 제거하여 누설을 예방합니다.
4. 충전할 수 있다고 표기되어 있지 않은 배터리(Zinc Air)는 재충전하지 않습니다. 누설 및 폭발의 위험이 있습니다.
5. 배터리는 태워서 폐기하지 않습니다.
6. 사용한 배터리는 환경에 위해합니다. 폐기시에는 적절한 배터리 폐기 규정을 따르도록 합니다.

## 기타사항

수입업 허가번호: 제 430호

제품명 : 기도형 보청기

※본 제품은 의료기기임

EO998-DW  
EO798-DW  
EO598-DW

허가번호: 수허14-3552호

【중량, 포장단위】 4.60g / 1 set

【가격】 ₩ 3,900,000(EO998-DW) / ₩ 2,900,000(EO798-DW)  
₩ 2,100,000(EO598-DW)

소비전류: 4mA / 전지전압: 1.4V / 전지종류: Zinc Air 배터리 675타입

사용시간: 135시간이상

\*제조번호 및 제조년월일 : 용기 또는 외부포장라벨 참조

## 문제 해결

증상	원인	해결방법
소리가 나지 않는 경우	전원을 켜지 않은 경우	배터리 삽입구를 닫아서 전원을 켭니다.
	배터리가 다 소모된 경우	배터리를 교체합니다.
	배터리 문이 닫혀있지 않은 경우	배터리를 다시 제대로 삽입합니다.
	이어몰드 또는 튜브가 막혀있는 경우	이어몰드 또는 튜브를 청소합니다.
	귀지필터가 막혀있는 경우	귀지 필터를 교체하거나 보청기 전문가와 상의합니다.
	스탠바이 모드	볼륨 조절기의 상단 버튼을 눌러줍니다.
소리가 충분히 크게 들리지 않는 경우	이어몰드가 제대로 삽입되지 않은 경우	이어몰드를 다시 정확히 삽입합니다.
	이어몰드 또는 둠이 막힌 경우	이어몰드를 청소하거나, 둠 또는 필터를 교체합니다.
	음향배출구(사운드아울렛필터)가 막힌경우	필터를 교체하거나 보청기 전문가와 상의합니다.
	청력이 바뀐 경우	보청기 전문가와 상의합니다.
	귀지가 너무 많은 경우	의사와 상의합니다.
	볼륨 세팅이 너무 낮은 경우	가능한 경우 볼륨을 높이거나 전문가와 상의합니다.
	볼륨이 최소화됨	볼륨조절기의 상단 버튼을 눌러줍니다.

## 문제 해결

※만약 이 안내서에 언급되지 않은 문제가 발생했거나 질문이 있으실 때에는 담당자와 상의하시기 바랍니다.		
증상	원인	해결방법
보청기에서 휘파람 소리/ 되울림 소리가 심한 경우	이어몰드가 제대로 삽입되지 않은 경우	이어몰드를 조심스럽게 다시 삽입합니다.
	돔이 제대로 삽입되지 않은 경우	돔을 다시 삽입합니다.
	귀지가 너무 많은 경우	보청기 전문가와 상의합니다.
	피드백 컨트롤이 조정되어야 하는 경우	보청기 전문가와 상의합니다.
	이어몰드 튜빙이 오래되거나 손상된 경우	보청기 전문가와 상의합니다.
	보청기 세팅이 최적화되지 않은 경우	보청기 전문가와 상의합니다.
소리가 왜곡되거나 깨끗하지 않은 경우	배터리가 약한 경우	배터리를 교체합니다.
	이어몰드나 돔이 정확히 맞지 않는 경우	보청기 전문가와 상의합니다.
	보청기가 손상된 경우	보청기 전문가와 상의합니다.
	보청기 세팅이 최적화되지 않은 경우	보청기 전문가와 상의합니다.
무선기능이 작동하지 않은 경우	가능한 근본 원인 – 제품이 비행모드일 경우	프로그램버튼이 있는 경우: 배터리문을 열고 닫습니다. 프로그램버튼이 없는 경우: 배터리문을 10초동안 두번 열고 닫습니다.(만약 문제의 원인이 비행 모드일 경우)

## 보증 및 수리

ReSound 보청기의 보증기간은 실제 구입일로부터 적용되며 제품에 따라 정해진 보증기간을 제공해 드립니다. 리사운드 보청기 담당자와 상의하시기 바랍니다. 수리 서비스가 필요한 보청기는 보청기 담당자에게 문의하시기 바랍니다. 결함이 발생한 리사운드 보청기는 반드시 리사운드가 자격을 부여한 전문 기술자가 수리하여야 합니다. 보청기의 케이스를 직접 열어보시면 보증이 불가능합니다.

보청기의 AS가 필요하신 경우, GN ReSound 고객센터에 문의하십시오.

※ 고객센터 : 1577-2922

## 보청기

보청기는 정상적인 청력을 회복시키지 않고 생체기관 조건에 따라 발생한 청력손실을 향상시키지도 않습니다. 보청기를 지속적으로 사용할 것을 권합니다. 보통 불규칙적인 사용으로는 보청기에서 얻을 수 있는 최대 효과를 얻을 수 없습니다.

보청기 사용은 청력복구의 일부이며 청각적 훈련 및 입술읽기의 지도 등에 의해 보완되어야 합니다.

ReSound 무선장비는 2.4GHz-2.48GHz의 주파수 범위에서 작동합니다.

ReSound 무선장비는 2.4GHz-2.4GHz의 주파수 범위에서 작동하는 RF송신기를 포함합니다.

무선기능 사용을 위해서는 ReSound Unite 액세서리만 사용하십시오. 더 자세한 안내를 원하시면

ReSound Unite 액세서리 관련 사용자 가이드를 참고하시기 바랍니다.

## 스마트폰 어플리케이션(Smart phone app)과 리사운드 보청기의 사용

(\* EO998-DW, EO798-DW 모델만 해당)

### 스마트폰 앱의 사용목적:

리사운드 스마트폰 앱은 리사운드 보청기와 사용을 목적으로 만들어졌습니다. 리사운드 스마트폰 앱은 앱이 개발된 스마트폰을 통하여 리사운드 무선 보청기로 신호를 송수신합니다.

### 스마트폰 앱의 사용:

앱의 업데이트 공지는 차단할 수 없고 오히려 사용자가 모든 업데이트를 설치하여 앱이 정확하게 기능하고 최신상태를 유지할 것을 권합니다. 앱은 반드시 사용목적을 위해 오직 리사운드 제품과 사용하여야 합니다. 리사운드는 다른 제품과 앱을 사용하는 것에 대해 책임을 지지 않습니다.

Statement :

본 기기는 FCC Rule (미국연방통신위원회 규칙)의 Part 15를 따라 제작되었으며 다음의 조건에 따라 작동합니다:

(1) 본 기기는 유해한 전파간섭을 일으키지 않을 수 있습니다.

(2) 본 기기는 오작동을 유발할 수 있는 전파간섭을 포함한 모든 전파간섭을 반드시 받아들여야 합니다.

주의 : 본 기기는 FCC Rule의 Part 15에 의거하여 Class B 디지털 기기에 대한 규제에 따라 시험을 거쳐 제작되었습니다. 이 규제는 주거지지 설치 시 발생하는 유해한 전파간섭에 대한 합리적인 보호책의 제공을 위해 제정되었습니다. 본 기기는 무선 주파수 에너지를 발생 및 사용하며 방사할 수 있습니다. 본 기기를 설명서에 따라 설치하여 사용하지 않는다면 무선통신에 유해한 전파간섭을 일으킬 수 있습니다.

그러나 특정한 설치 시에는 전파간섭이 발생하지 않는다고 보장 할 수 있는 것은 아닙니다.

기기를 켜고 끄는 과정에서 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 전파간섭이 발생되었다면, 아래 제시된 방법 통해 문제를 해결해 보십시오.

- 수신 안테나의 방향을 재설정하거나 재배치 한다.
- 장비와 리시버 간의 거리를 멀리한다.
- 리시버를 연결하였던 곳이 아닌 다른 전기 콘센트에 장비를 연결한다.
- 판매자 또는 숙련된 라디오/텔레비전 기술자에게 도움을 요청한다.

\*제품 변경 및 수정으로 사용자의 장비 작동 권한이 무효화 될 수 있습니다.

제품은 다음의 규제 사항을 준수합니다:

- 유럽 : 의료기기(MDD) 자문위원회 명령 93/42/EEC의 부록 I에 따른 Essential Requirements와 Directive 1999/5/EC (R&TTE)의 필수 규정과 관련 조항에 따릅니다.
- 자기적합성선언 (Declaration of Conformity)은 [www.resound.com](http://www.resound.com)에서 찾아보실 수 있습니다.
- 미국: FCC CFR 47 Part 15, subpart C
- 유럽과 미국 이외의 국가에서 요구하는 기타 확인된 적용 가능한 국제 규제 요구사항. 지역의 국가 규제사항을 참조하십시오.

“Made for iPhone” 은 특별히 아이폰과 연결되도록 설계된 무선 액세서리를 의미하며 개발자가 애플의 성능 규격을 충족함을 인증하였습니다. 애플은 본 기기의 작동 또는 전기안전 및 규제기준에 책임을 지지 않습니다. 아이폰과 본 액세서리를 사용하게 되면 무선성능에 영향을 미칠수 있음을 주지하시기 바랍니다.

보청기의 폐기를 위해서는 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

“ 해당 무선설비는 전파통신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.”

## -무선사양

사용주파수: 2404~2478MHz

채널수: 40채널

공중선전력(전계강도): 10mW이하

변조방식: AM, 80%, 1KHz sine wave

-인증사항표시

모델명	EO998-DW, EO798-DW, EO598-DW
인증자 상호	GN Hearing A/S
기기명칭	특정소출력 무선기기(무선 데이터통신 시스템용 무선기기)
인증번호	MSIP-CRM-GH1-LO90
제조연월일	별도표기
제조자/제조국	GN Hearing A/S, 덴마크, 중국

Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Memo

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---